



Instrucțiuni de utilizare.
Vă rugăm citiți cu atenție!



Cu formulă
îmbunătățită

Fixare stabilă pentru protezele dentare cu **Protefix®** **Protefix®** adezivă Extra-forte cu Mentă cu putere adezivă în mediu umed

Extractul de Mentă conține numeroase substanțe vitale bioactive, care s-au remarcat în industria cosmetică, în special în compoziția produselor stomatologice, pentru senzația de prospețime pe care acestea o conferă. Centrul de cercetări de la **Protefix®** a folosit aceste proprietăți în Crema adezivă cu Mentă. Aceasta conferă un sentiment de siguranță în purtarea protezei, însoțit de o senzație de prospețime. **Protefix®** Cremă adezivă Extra-forte cu Mentă poate, datorită capacității sale de adeziune în mediu umed, să fie aplicată direct pe proteza umedă. Acțiunea este rapidă, dar și de durată și conferă, astfel, siguranță și încredere pentru toată ziua, chiar și în cazul unor probleme dificile de adeziune.

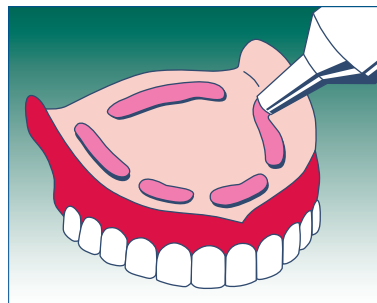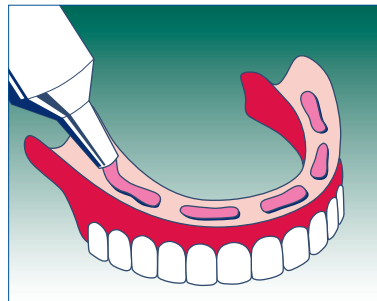

Mod de aplicare:

Curățați proteza de orice resturi și depuneri alimentare și aplicați **Protefix®** Cremă adezivă Extra-forte cu Mentă pe proteza umedă, în șanțurile protezei care se aplică pe creasta gingivală. Apăsati tubul în treimea inferioară, aproape de orificiul de deschidere. La nevoie, aplicați **Protefix®** Cremă adezivă Extra-forte cu Mentă și pe partea posterioară a protezei superioare, care va adera de cerul gurii. Dozați cu economie **Protefix®** Cremă adezivă Extra-forte cu Mentă, deoarece orice exces ar putea determina modificarea adeziunii protezei. Așezați apoi proteza dentară în gură și apăsați ferm câteva secunde, pentru fixarea pe gingie. Așteptați 5 minute până la prima masă. Crema adezivă nu va modifica esențial poziția protezei. După aplicarea cremei adezive închideți tubul cu grijă, mențineți orificiul curat și uscat, deoarece pătrunderea oricărui lichid poate provoca întărirea cremei. Protejați conținutul tubului împotriva contactului cu lichide! Resturile de cremă adezivă pot fi îndepărtate cu ajutorul unui bețișor cu vată, înmuiat în ulei comestibil. În anumite circumstanțe, poate apărea o depunere de ulei care nu afectează sub nici o formă efectul adeziv al cremei. Vă rugăm, îndepărtați uleiul respectiv. Folosirea cremei adezive ar trebui să fie temporară.

Dozare:

Doza zilnică este de până la 0,8 g (aproximativ 7 cm) cremă adezivă.

Contraindicații:

Hipersensibilitate la oricare dintre ingrediente.

Efecte adverse:

În cazuri izolate, reacții de sensibilitate a mucoasei cavității bucale sau chiar sistemice, nu pot fi excluse. În cazul apariției unei reacții alergice, vă rugăm contactați medicul stomatolog.

Sfaturi importante:

- A se folosi numai pe mucoase sănătoase.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- A nu se folosi după termenul de expirare.



Compoziție:

Protefix® Cremă adezivă Extra-forte cu Mentă conține: amestec de săruri de sodiu și calciu ale copolimerului de metil vinil eter cu anhidrida maleică, carboximetilceluloză, parafină, vaselină, dioxid de siliciu, ceară albă, mentil-lactat, extract uscat de mentă, ulei de mentă creață, ulei de mentă, azorubină, metil 4-hidroxibenzoat.

Data verificării textului: 09/2018.

Protefix® Cremă adezivă Extra-forte cu Mentă

4 Efecte

Prospețime
Adeziv pe
proteza umedă
Fixare puternică
Protecție

1. **Prospețime:** cu gust proaspăt de mentă, pentru o senzație de prospețime de durată a cavității bucale
2. **Adeziv pe proteza umedă:** Poate fi aplicată direct pe proteză, în mediu umed
3. **Fixare puternică:** Fixare extra-forte, pe termen lung
4. **Protecție:** Sigilarea marginală efectivă împiedică pătrunderea resturilor alimentare sub proteză

Formulă sigură: fără săruri de zinc.

Se poate folosi și pentru proteze parțiale.


Queisser
PHARMA
D-24914 Flensburg
www.protefix.ro

90727394 RO